

BePa-Clip® VARIO

tracheostomi tub fixation.

patenterad



BePa-Clip® VARIO är en patenterad tracheostomi tub fixation för vuxna.



BePa-Clip® VARIO finns i fyra olika storlekar, med hake (H) eller kardborre (V) fäste:

BePa-Clip®	VARIO	18/H	Artikel Nr.	200 301
BePa-Clip®	VARIO	25/H	Artikel Nr.	200 501
BePa-Clip®	VARIO	30/H	Artikel Nr.	200 601
BePa-Clip®	VARIO	36/H	Artikel Nr.	200 701
BePa-Clip®	VARIO	18/V	Artikel Nr.	200 302
BePa-Clip®	VARIO	25/V	Artikel Nr.	200 502
BePa-Clip®	VARIO	30/V	Artikel Nr.	200 602
BePa-Clip®	VARIO	36/V	Artikel Nr.	200 702

Storleken på vadderingen anges genom siffror framför(V)eller(H)
I artikel identifikationen, ex 18/H = 18-cm lång vaddering.
Kontrollera justeringsbanden på fixationen så att maximal komfort och säkerhet uppnås. Kontakta oss gärna gällande
Individuell produktlösning t.ex. specialstorlekar

FÖRDELAR

Säker, snabb och användarvänlig.

Mjuk – supermjuk vaddering med bomulls överdrag

Latex fri, ej häftande- allergi fri, trycksårs förebyggande

Bakterie neutral-lätt absorberande och luftgenomsläpplig vaddering

Håller sin ursprungliga form även under längre användningsperioder


Individuellt justerbar - passar alla patienter

Passar alla tracheostomi plattor på marknaden

Tysk kvalitet

patient Personal Ekonomi

•	•	•
•	•	
•	•	•
•	•	
•	•	•
•	•	•
•	•	•

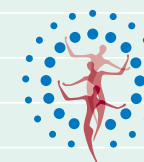

Salubrious

Medicinteknik för vårdkvalitet

Fack 5021 448 51 Tollered

Tel: 031-710 44 70

Fax: 031-710 44 75

E-post: lars.renkvist@salubrious.se


www.salubrious.se



Placera BePa-clip Vario fixationen under patientens nacke.



För kroken på fixations bandet igenom kragen på tracheostomi plattan och fixera. Samma tillvägagångssätt gäller för kardborre funktionen.

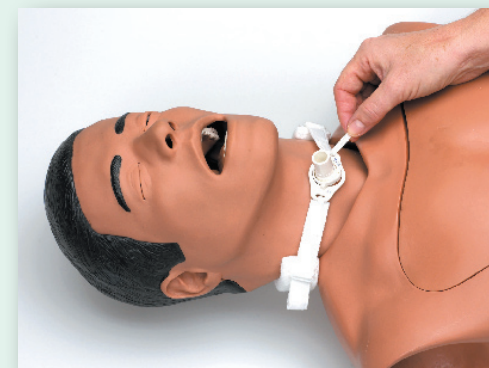


Repetera proceduren på andra sidan.



Använd justeringsbanden för individuell justering, komfort och säkerhet.



Komplett fixering.

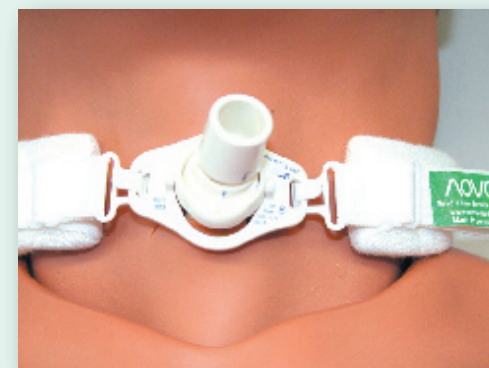

Krok fixering.