

Duo-Clip

Två delad tracheostomi tub fixation

Duo-Clip finns med hake (H) eller kardborre (V) fäste



Duo-Clip finns med hake (H) eller kardborre (V) fäste

Duo-Clip H Artikel Nr. 200 801


Duo-Clip V Artikel Nr. 200 802

FÖRDELAR

Säker, snabb och användarvänlig.
Mjuk – supermjuk vaddering med bomulls överdrag
Latex fri, ej häftande- allergi fri, trycksårs förebyggande
Bakterie neutral-lätt absorberande och luftgenomsläpplig vaddering
Håller sin ursprungliga form även under längre användningsperioder
Individuellt justerbar - passar alla patienter
Passar alla tracheostomi plattor på marknaden
Steriliserbar
Tysk kvalitet

Patient Personal Ekonomi

•	•	•
•	•	
•	•	•
•	•	
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•

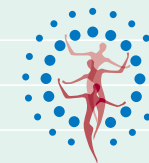

Salubrious
Medicinteknik för vårdkvalitet

Fack 5021 448 51 Tollered
Tel: 031-710 44 70
Fax: 031-710 44 75
E-post: lars.renkvist@salubrious.se

www.salubrious.se

Duo-Clip



För kroken på den korta delen av fixationsbandet igenom kragen på tracheostomi plattan och fixera. Samma tillvägagångsätt gäller för kardborre funktionen.



Repetera proceduren med den långa delen av fixationsbandet på andra sidan



Ta den långa delen och för den runt patientens nacke



Vid behov klipp bort överskott från den långa delen för att få en perfekt passform.



Fäst ihop de båda delarna med kardborrebandet för komplett fixation



Kardborre fixation