
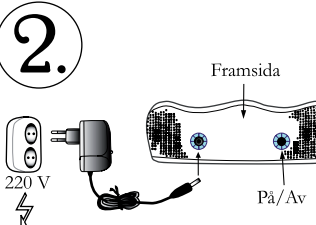


AireRx[®] Cool Comfort

Så här kommer du igång.

1. 

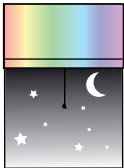
Packa upp Din AireRx och sätt på medföljande överdrag. Det är viktigt att dragkedjan sitter på baksidan av dynan och att hålet för laddaren sitter på framsidan.

2. 

Dynan ska laddas full innan den används första gången. ⌚ Det tar ungefär 6-10 timmar att ladda och när dynan är färdigladdad lyser lampan på laddaren grönt.

3. 

Dynan ska provsittas en dag. Fungerar den inte till belåtenhet, ska förskrivare/ordinatör kontaktas.

4. 

Ladda t.e.x. under natten.
Röd lampa - laddning pågår.
Grön lampa - färdigladdad.
Fullt laddade batterier räcker till 16-20 timmars fläkttid.
OBS! Använd inte fläkten när denna laddar!

5. 

Rengöring:
Överdraget tvättas i tvättmaskin vrängt ut & in. Dynan torkas av med fuktig trasa och lite utspädd tvällösning alternativt desinfektionsmedel.

Lycka till med Din nya dyna!