








Den enkla lösningen på Ert problem!

## Fullt roterbar!




### EASY används för:

-  Förebyggande av trycksår.
-  Att motverka skjuvning/ framåtgående.
-  Dementa brukare.
-  Lätt att använda på sjukvårdsinstitutioner och av färdtjänst.
-  Brukare med smärta.
-  Brukare som behöver "stabil sittande".
-  Spastiska brukare.

Motverka skjuvning/framåtgående  
Stabil sittande  
Smärtmjukt sittande  
Positionerande  
Tryckfördelande  
Tryckavlastande  
Läkande små sår\*\*  
Sårhäkande\*\*

Dyna	Egenskaper								Anteckningar
Trio	X	X	X		X				
Xcell	X	X			X				
Easy	X	X	X		X	X			
Duogel	X	X	X		X	X	X		
Gelcell	X	X	X		X	X	X	X	
Gelcell G2	X	X	X	X	X	X	X		
Deep Comfort									(Nyhet 2007)

\* Norton 1-2 \*\* Norton 3

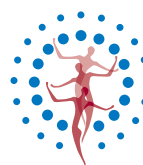

**Salubrious**  
Medicinteknik för vårdkvalitet

Fack 5021 448 51 Tollered  
Tel: 031-710 44 70  
Fax: 031-710 44 75  
E-post: rehab@salubrious.se  
www.salubrious.se

### Easy dynans konstruktion:

- Kombination av skum o silikongel.
- Har ett inre inkontinens skydd för rekonditionering och ökad produkt livslängd.
- Tunn, endast 6 cm.
- Rektangulär form ,2 storlekar t.ex. 45cm x 50cm = 50cm x 45cm.
- Överdrag finns som luftgenomsläppligt, avtorkningsbart samt inkontinens.
- Antiglidbehandlat överdrag

### Easy dynans egenskaper:

- Tryckavlastande och förebyggande av trycksår.
- Fullt roterbar.
- Kan ej läggas fel.
- Enkel placering och tydlig märkning.
- Rekommenderad brukarvikt max 130 kg.
- 2 års garanti.

### Storlekar

ArtikelNr	Produkt	Dimensioner (cm) B/D/H	Vikt/kg (+/-5%)	EAN-kod
RE010-1416	Easy Svart	36x40x6 / 40x36x6	1,8	7350010171256
RE010-1616	Easy Svart	40x40x6	1,8	7350010171263
RE010-1717	Easy Svart	43x43x6	1,9	7350010171270
RE010-1816	Easy Svart	45x40x6 / 40x45x6	1,9	7350010171287
RE010-1818	Easy Svart	45x45x6	1,9	7350010171294
RE010-2018	Easy Svart	50x45x6 / 45x50x6	2,0	7350010171300
RE010-2020	Easy Svart	50x50x6	2,0	7350010171317
RE010-2218	Easy Svart	55x45x6 / 45x55x6	2,0	7350010171324
RE005-1416	Easy Blå	36x40x6 / 40x36x6	1,8	7350010171201
RE005-16	Easy Blå	40x40x6	1,8	7350010170396
RE005-17	Easy Blå	43x43x6	1,9	7350010170167
RE005-1816	Easy Blå	45x40x6 / 40x45x6	1,9	7350010170402
RE005-18	Easy Blå	45x45x6	1,9	7350010170174
RE005-2018	Easy Blå	50x45x6 / 45x50x6	2,0	7350010171102
RE005-2020	Easy Blå	50x50x6	2,0	7350010171072
RE005-2218	Easy Blå	55x45x6 / 45x55x6	2,0	7350010171218

Easy Svart har ett luftgenomsläppligt inkontinens överdrag  
Easy Blå har ett avtorkningsbart överdrag


Rekommenderad brukarvikt max 130kg.

Tvättinstruktion överdrag  

### Tvättinstruktion Easy

Inre överdraget avtorkas med fuktig trasa och mildt desinfektionsmedel.

Kontakta Salubrious vid användning av andra rengöringsmedel.

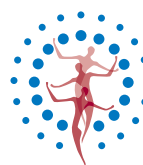

**Salubrious**  
Medicinteknik för vårdkvalitet

Fack 5021 448 51 Tollered

Tel: 031-710 44 70


Fax: 031-710 44 75

E-post: rehab@salubrious.se






www.salubrious.se
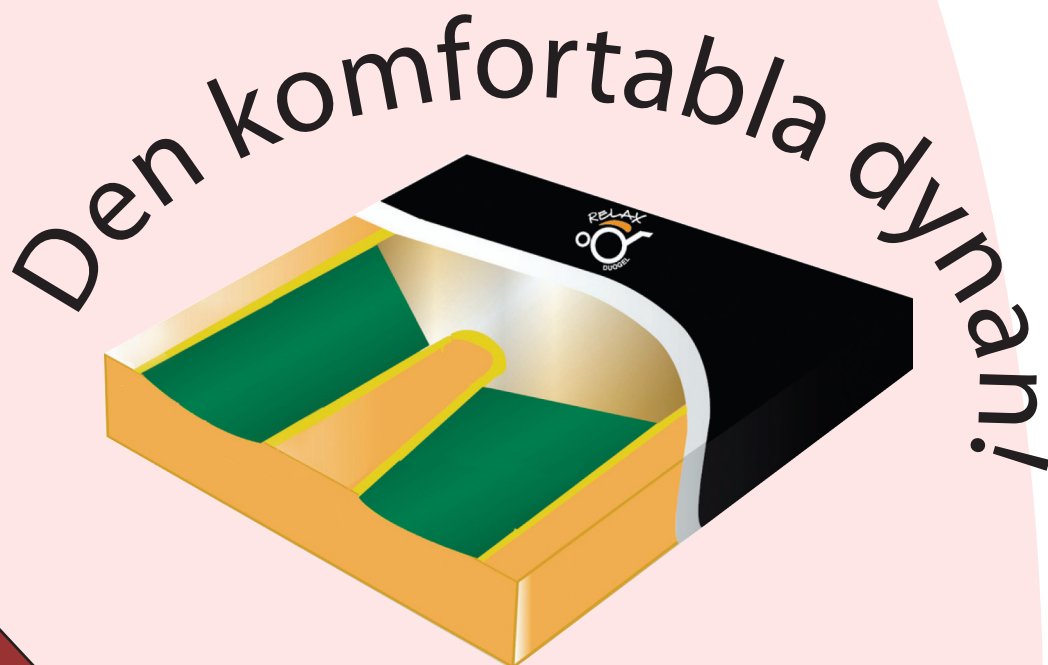
# RELAX DUOGEL

Unik uppbyggnad ger utmärkt komfort!




## DUOGEL används för:

-  Att ge god tryckavlastning.
-  Att motverka skjuvning/ framåtgång.
-  Brukare som är smärtpåverkade.
-  Effektiv läkning av små sår.\*
-  Att ge "komfortabelt sittande."

Motverka skjuvning/framåtgång  
Stabilitet sittande  
Smärtmjukt sittande  
Positionerande  
Tryckfördelande  
Tryckavlastande  
Läkande små sår\*\*  
Sårhälande\*\*

Dyna	Egenskaper								Anteckningar
Trio	X	X	X		X				
Xcell	X	X			X				
Easy	X	X	X		X	X			
Duogel	X	X	X		X	X	X		
Gelcell	X	X	X		X	X	X	X	
Gelcell G2	X	X	X	X	X	X	X		
Deep Comfort									(Nyhet 2007)

\* Norton 1-2 \*\* Norton 3

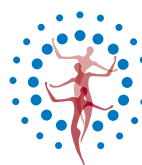

**Salubrious**  
Medicinteknik för vårdkvalitet

Fack 5021 448 51 Tollered  
Tel: 031-710 44 70  
Fax: 031-710 44 75  
E-post: rehab@salubrious.se  
www.salubrious.se

### Duogel dynans konstruktion:

- Tillverkad för hand av en unik kombination av skum och silikongel.
- Utskuret skum för sittgrop och benstöd.
- Tryckavlastande silikongel limmad på utskuren skumbas.
- Har ett inre inkontinensskydd för rekonditionering och ökad produktivslängd.
- Finns med tre olika överdrag, luftgenomsläppligt, avtorkningsbart samt inkontinens.
- Antiglidbehandlat överdrag.

### Duogel dynans egenskaper:

- Dynans unika konstruktion ger mycket hög tryckavlastning.
- Lättskött tryckavlastande dyna utan, pump och inställningar.
- Sval - anpassar sig efter brukarens kroppstemperatur.
- Rekommenderad brukarvikt max 130 kg.
- Tydlig märkning för placering.
- 2 års garanti.

### Storlekar

ArtikelNr	Produkt	Dimensioner (cm)	Vikt/kg (+/-5%)	EAN-kod
		B/D/H		
RD003-1514	Relax Duogel svart	37,5x35x7	1,8	7350010174950
RD003-16	Relax Duogel svart	40x40x7	1,8	7350010170532
RD003-1618	Relax Duogel svart	40x45x7	1,8	7350010171157
RD003-17	Relax Duogel svart	43x43x7	1,9	7350010170549
RD003-18	Relax Duogel svart	45x40x7	1,9	7350010170556
RD003-1818	Relax Duogel svart	45x45x7	1,9	7350010170570
RD003-1820	Relax Duogel svart	45x50x7	1,9	7350010171164
RD003-20	Relax Duogel svart	50x45x7	1,9	7350010170563
RD003-2020	Relax Duogel svart	50x50x7	1,9	7350010174967
RD003-2218	Relax Duogel svart	55x45x7	1,9	7350010174639
RD003-2218	Relax Duogel svart	60x45x7	1,9	7350010174646
RD006-1514	Relax Duogel blå	37,5x35x7	1,8	7350010174974
RD006-16	Relax Duogel blå	40x40x7	1,8	7350010170235
RD006-1618	Relax Duogel blå	40x45x7	1,8	7350010171133
RD006-17	Relax Duogel blå	43x43x7	1,9	7350010170242
RD006-18	Relax Duogel blå	45x40x7	1,9	7350010170259
RD006-1818	Relax Duogel blå	45x45x7	1,9	7350010170273
RD006-1820	Relax Duogel blå	45x50x7	1,9	7350010171140
RD006-20	Relax Duogel blå	50x45x7	1,9	7350010170266
RD006-2020	Relax Duogel blå	50x50x7	1,9	7350010174981
RD006-2218	Relax Duogel blå	55x45x7	1,9	7350010174653
RD006-2418	Relax Duogel blå	60x45x7	1,9	7350010174660

Duogel Svart har ett luftgenomsläppligt inkontinens överdrag  
Duogel Blå har ett avtorkningsbart överdrag


Rekommenderad brukarvikt max 130kg.

Tvättinstruktion överdrag  

### Tvättinstruktion Duogel

Inre överdraget avtorkas med fuktig trasa och mildt desinfektionsmedel.

Kontakta Salubrious vid användning av andra rengöringsmedel.

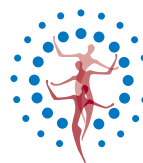


**Salubrious**  
Medicinteknik för vårdkvalitet

Fack 5021 448 51 Tollered  
Tel: 031-710 44 70  
Fax: 031-710 44 75  
E-post: rehab@salubrious.se  
www.salubrious.se


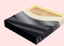
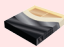
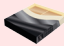
# RELAX XCELL

Dynan för de fullvuxna brukarna!

Den stabila dynan!

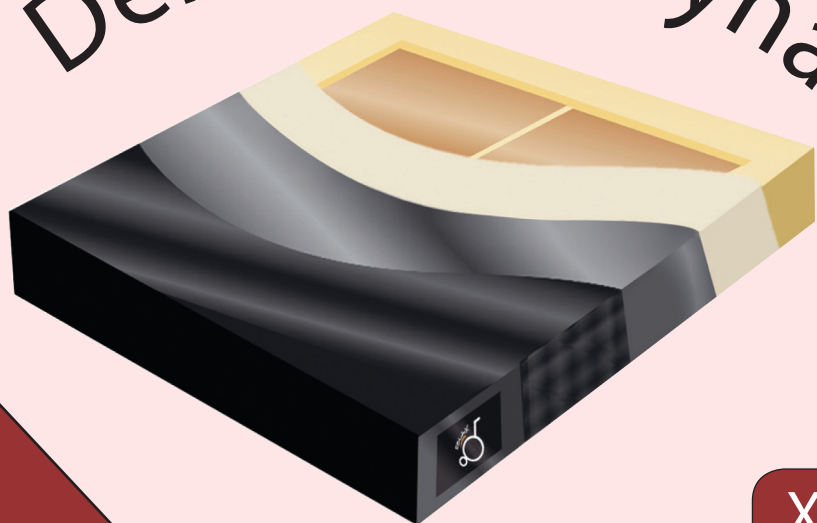


## XCELL används för:

-  Den fullvuxna brukaren.
-  Förebyggande av trycksår.
-  Att fördela/minska trycket.
-  Att motverka skjuvning/framåt glidning.

Motverka skjuvning/framåtglidning  
Stabilt sittande  
Smärtmjukt sittande  
Positionerande  
Tryckfördelande  
Tryckavlastande  
Läkande små sår\*\*  
Sårhäkande\*\*

Dyna	Egenskaper								Anteckningar
Trio	X	X	X	X					
Xcell	X	X		X					
Easy	X	X	X	X	X				
Duogel	X	X	X	X	X	X			
Gelcell	X	X	X	X	X	X	X		
Gelcell G2	X	X	X	X	X	X	X		
Deep Comfort									(Nyhet 2007)

\* Norton 1-2 \*\* Norton 3

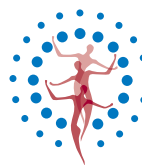

**Salubrious**  
Medicinteknik för vårdkvalitet

Fack 5021 448 51 Tollered  
Tel: 031-710 44 70  
Fax: 031-710 44 75  
E-post: rehab@salubrious.se  
www.salubrious.se

### Xcell dynans konstruktion:

- Kombination av skum och vattenbaserat silikongel.
- Överdrag finns som luftgenomsläppligt och inkontinens.
- Antiglidbehandlat överdrag.
- Har ett inre inkontinens skydd för rekonditionering och ökad produktlivslängd.

### Xcell dynans egenskaper:

- Tryckfördelande med god komfort
- Två storlekar i en ex. 45cmx50cm = 50cmx45cm.
- Avsedd för brukare med vikt över 90kg, brukarvikt max 130kg.
- Enkel placering och märkning.
- 2 års garanti.

### Storlekar

ArtikelNr	Produkt	Dimensioner (cm)	Vikt/kg (+/-5%)	EAN-kod
RX002-16	Relax Xcell	40x40x7	3,0	7350010170471
RX002-17	Relax Xcell	43x43x7	3,5	7350010170488
RX002-18	Relax Xcell	45x40x7 / 40x45x7	3,6	7350010170495
RX002-1818	Relax Xcell	45x45x7	3,8	7350010170518
RX002-20	Relax Xcell	50x45x7 / 45x50x7	4,0	7350010170921
RX002-2020	Relax Xcell	50x50x7	4,1	7350010170525
RX002-22	Relax Xcell	55x45x7 / 45x55x7	4,1	7350010170501
RX002-24	Relax Xcell	60x45x7 / 45x60x7	4,5	7350010170914

Rekommenderad brukarvikt max 130kg.

Tvättinstruktion överdrag  

### Tvättinstruktion Xcell


Inre överdraget avtorkas med fuktig trasa och mildt desinfektionsmedel.

Kontakta Salubrious vid användning av andra rengöringsmedel.






# RELAX TRIO

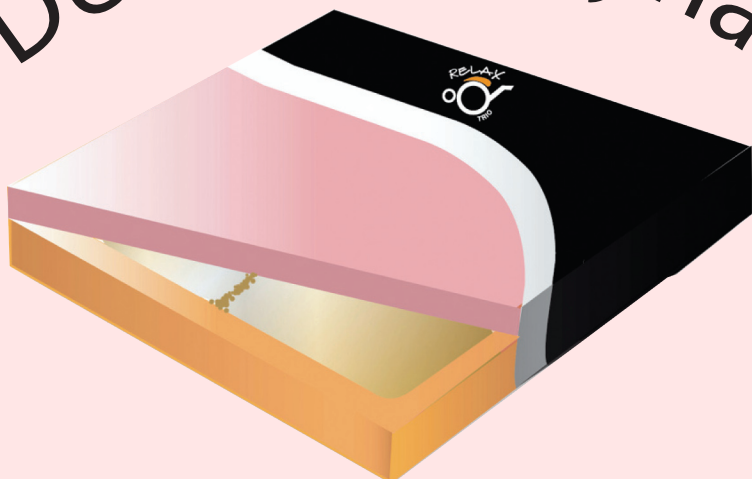Den "lätta" lösningen på Ert problem!

Den "lätta" dynan!




## TRIO används för:

-  Förebyggande av trycksår.
-  Motverkning av skjuvning/ framåglidning.
-  Tryckfördelning.
-  Lågt stabilt sittande.
-  Lätta brukare.

Motverka skjuvning/framåglidning  
Stabilt sittande  
Smärtmjukt sittande  
Positionerande  
Tryckfördelande  
Tryckavlastande  
Läkande små sår\*\*  
Sårhäkande\*\*

Dyna	Egenskaper								Anteckningar
Trio	X	X	X	X					
Xcell	X	X		X					
Easy	X	X	X	X	X				
Duogel	X	X	X	X	X	X			
Gelcell	X	X	X	X	X	X	X		
Gelcell G2	X	X	X	X	X	X	X		
Deep Comfort									(Nyhet 2007)

\* Norton 1-2 \*\* Norton 3

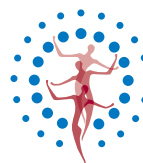

**Salubrious**  
Medicinteknik för vårdkvalitet

Fack 5021 448 51 Tollered  
Tel: 031-710 44 70  
Fax: 031-710 44 75  
E-post: rehab@salubrious.se  
www.salubrious.se

### Trio dynans konstruktion:

- Kombination av skum o silikongel.
- Två storlekar i en ex. 45cmx40cm = 40cmx45cm.
- Har ett inre inkontinens skydd för rekonditionering och ökad produkt livslängd.
- Överdrag finns som luftgenomsläppligt och inkontinens.
- Antiglidbehandlat överdrag.

### Trio dynans egenskaper:

- Tryckfördelande och förebyggande av trycksår.
- Lätt och tunn, endast 4cm hög.
- Enkel placering, pilen uppåt.
- Rekommenderad brukarvikt max 80 kg.
- 2 års garanti.

### Storlekar

ArtikelNr	Produkt	Dimensioner (cm)	Vikt/kg (+/-5%)	EAN-kod
RT001-1416	Relax Trio	36x40x4 / 40x36x4	1,3	7350010171195
RT001-16	Relax Trio	40x40x4	1,3	7350010170037
RT001-17	Relax Trio	43x43x4	1,4	7350010170020
RT001-18	Relax Trio	45x40x4 / 40x45x4	1,5	7350010170013
RT001-1818	Relax Trio	45x45x4	1,6	7350010170198


Rekommenderad brukarvikt max 80kg.

### Tvättinstruktion överdrag

### Tvättinstruktion Trio

Inre överdraget avtorkas med fuktig trasa och mildt desinfektionsmedel.

Kontakta Salubrious vid användning av andra rengöringsmedel.

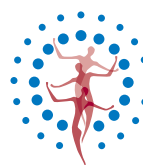

**Salubrious**  
Medicinteknik för vårdkvalitet

Fack 5021 448 51 Tollered  
Tel: 031-710 44 70  
Fax: 031-710 44 75  
E-post: rehab@salubrious.se  
www.salubrious.se







# RELAX GELCELL G2

Kombination av gel & luft!

Dynan med två sektioneri




## GELCELL G2 används för:

-  Att ge god tryckavlastning.
-  Att motverka skjuvning/ framåtgång.
-  Brukare som är smärtpåverkade.
-  Effektiv läkning av små sår.\*
-  Att ge "komfortabelt sittande."
-  Stabilt sittande och positionering.

Motverka skjuvning/framåtgång  
Stabilt sittande  
Smärtnmjukt sittande  
Positionerande  
Tryckfördelande  
Tryckavlastande  
Läkande små sår\*\*  
Sårhälande\*\*

Dyna	Egenskaper								Anteckningar
Trio	X	X	X		X				
Xcell	X	X			X				
Easy	X	X	X		X	X			
Duogel	X	X	X		X	X	X		
Gelcell	X	X	X		X	X	X	X	
Gelcell G2	X	X	X	X	X	X	X		
Deep Comfort									(Nyhet 2007)

\* Norton 1-2 \*\* Norton 3

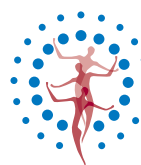

**Salubrious**  
Medicinteknik för vårdkvalitet

Fack 5021 448 51 Tollered  
Tel: 031-710 44 70  
Fax: 031-710 44 75  
E-post: rehab@salubrious.se  
www.salubrious.se

### Gelcell G2 dynans konstruktion:

- Kombination av luft och silikongel.
- Unik kombination av luft och silikongel, eliminerar total genomsittning om läckage.
- Backventil förhindrar ofrivilligt luftutsläpp.
- Överdrag finns som luftgenomsläppligt och inkontinens.
- Antiglidbehandlat överdrag.

### Gelcell G2 dynans egenskaper:

- Sval - rättar sig efter brukarens kroppstemperatur.
- Positionerande med hjälp av två ventiler.
- Mycket god tryckavlastning.
- Stabil.
- Kan med fördel användas i duschen. (utan överdrag och stängd ventil)
- Endast 4 cm hög.
- Rekommenderad brukarvikt max 130kg.
- Enkel placering och god märkning.
- 2 års garanti.

### Storlekar

ArtikelNr	Produkt	Dimensioner (cm) B/D/H	Vikt/kg (+/-5%)	EAN-kod
RG005-14	Gelcell G2	35x35x4	1,3	7350010171065
RG005-16	Gelcell G2	40x40x4	1,3	7350010171003
RG005-1618	Gelcell G2	40x45x4	1,4	7350010171034
RG005-17	Gelcell G2	43x43x4	1,4	7350010170419
RG005-18	Gelcell G2	45x40x4	1,5	7350010170426
RG005-1818	Gelcell G2	45x45x4	1,6	7350010171522


Rekommenderad brukarvikt max 130kg.

Tvättinstruktion överdrag  

### Tvättinstruktion Gelcell G2

Dynan avtorkas med fuktig trasa och mildt desinfektionsmedel.

Kontakta Salubrious vid användning av andra rengöringsmedel.

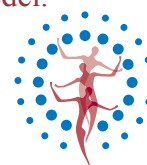

**Salubrious**  
Medicinteknik för vårdkvalitet

Fack 5021 448 51 Tollered  
Tel: 031-710 44 70  
Fax: 031-710 44 75  
E-post: rehab@salubrious.se  
www.salubrious.se







# RELAX GELCELL

Den säkra dynan för högriskanvändare!

För högriskanvändare!




## GELCELL används för:

-  Att ge mycket god tryckavlastning.
-  Att motverka skjuvning/ framåtgång.
-  Brukare som är smärtpåverkade.
-  Sårhälsande.\*\*
-  Att ge "komfortabelt sittande."
-  Ländryggsbesvär.

Motverka skjuvning/framåtgång  
Stabilitet sittande  
Smärtnmjukt sittande  
Positionerande  
Tryckfördelande  
Tryckavlastande  
Läkande små sår\*\*  
Sårhälsande\*\*

Dyna	Egenskaper								Anteckningar
Trio	X	X	X		X				
Xcell	X	X			X				
Easy	X	X	X		X	X			
Duogel	X	X	X		X	X	X		
Gelcell	X	X	X		X	X	X	X	
Gelcell G2	X	X	X	X	X	X	X		
Deep Comfort									(Nyhet 2007)

\* Norton 1-2 \*\* Norton 3

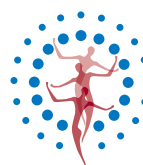

**Salubrious**  
Medicinteknik för vårdkvalitet

Fack 5021 448 51 Tollered  
Tel: 031-710 44 70  
Fax: 031-710 44 75  
E-post: rehab@salubrious.se  
www.salubrious.se

# RELAX GELCELL

Den säkra dynan för högriskanvändare!

## Gelcell dynans konstruktion:

- Kombination av luft och silikongel.
- Unik kombination av luft och silikongel, eliminerar total genomsittning om läckage.
- Backventil förhindrar ofrivilligt luftutsläpp.
- Överdrag finns som luftgenomsläppligt, avtorkningsbart och inkontinens.
- Antiglidbehandlat överdrag.

## Gelcell dynans egenskaper:

- Sval - rättar sig efter brukarens kroppstemperatur.
- Sår-läkande.\*\*
- Stabil, 1-cellig luftdyna.
- Mycket god tryckavlastning.
- Kan med fördel användas i duschen. (utan överdrag och stängd ventil)
- Endast 5 cm hög.
- Rekommenderad brukarvikt max 130kg.
- Enkel placering och god märkning.
- 2 års garanti.

## Storlekar

ArtikelNr	Produkt	Dimensioner (cm) B/D/H	Vikt/kg (+/-5%)	EAN-kod
RG004-15	Relax Gelcell svart	35x37x5	1,5	7350010171256
RG004-16	Relax Gelcell svart	40x40x5	1,5	7350010170136
RG004-17	Relax Gelcell svart	43x43x5	1,6	7350010170143
RG004-18	Relax Gelcell svart	45x40x5	1,6	7350010170150
RG004-1818	Relax Gelcell svart	45x45x5	1,7	7350010170280
RG004-152	Relax Gelcell blå	35x37x5	1,5	7350010170860
RG004-162	Relax Gelcell blå	40x40x5	1,5	7350010170877
RG004-172	Relax Gelcell blå	43x43x5	1,6	7350010170884
RG004-182	Relax Gelcell blå	45x40x5	1,6	7350010170891
RG004-18182	Relax Gelcell blå	45x45x5	1,7	7350010170907

Gelcell Blå = Avtorkningsbart - Gelcell Svart = Mest luftgenomsläppligt/Inkontinens

Rekommenderad brukarvikt max 130kg.

Tvättinstruktion överdrag  

## Tvättinstruktion Gelcell

Dynan avtorkas med fuktig trasa och mildt desinfektionsmedel.

Kontakta Salubrious vid användning av andra rengöringsmedel.



Fack 5021 448 51 Tollered  
Tel: 031-710 44 70  
Fax: 031-710 44 75  
E-post: rehab@salubrious.se  
www.salubrious.se