


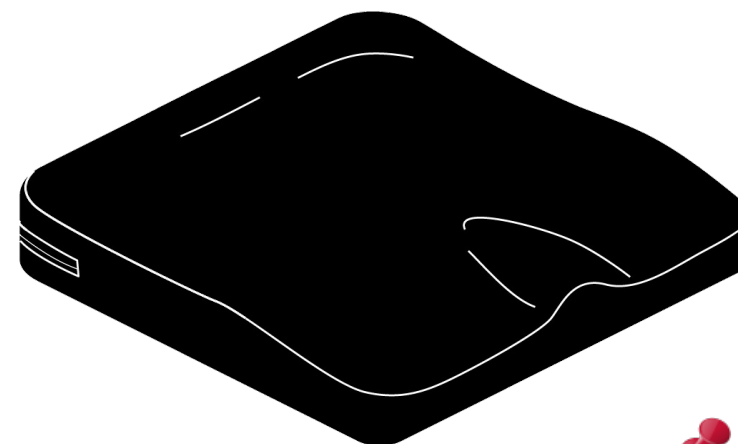

# Synergy Spectrum

Denna manual skall användas för den Synergydyna som erhållits. Om det är någon information i denna manual som är oklar eller om du behöver ytterligare hjälp, vänlig kontakta Salubrious AB. Maxvikt brukare: 160 kg.



Good Medical

Box 5021 • 448 51 Tollerød • Sverige

Telefon: 031- 710 44 70

Fax: 031-710 44 75

e-post: [rehab@salubrious.se](mailto:rehab@salubrious.se)

[www.salubrious.se](http://www.salubrious.se)

[www.goodmedical.se](http://www.goodmedical.se)

## Innehållsförteckning:

Placering .....	2
Förvaring .....	2
Rengöring .....	3

## -Synergy Spectrum-

### Placering:

Synergy Spectrum är uppmärkt på både dynstomme och överdrag för rätt placering.

För korrekt placering av Synergy Spectrum gör följande:

1. Hitta etiketten med texten ”bottom/back” på dynans överdrag.
2. Placera dynan på sitsen så att dragkedjan på överdraget och ”bottom/back” hamnar bak på stolens/ rullstolens sittyta. ”Bottom/back”-etiketten skall vara nedåt. Viktigt att tänka på när du sätter på överdraget.

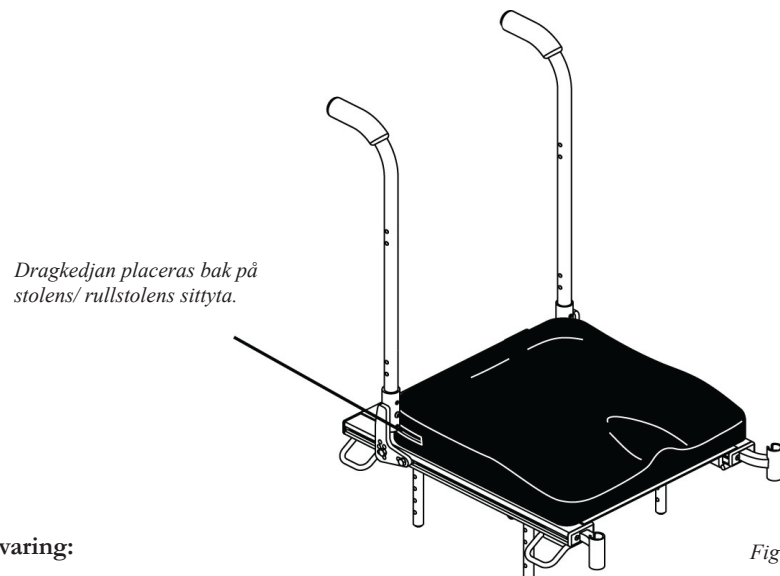


Fig. 1

### Förvaring:

Synergy Spectrum bör förvaras i rumstemperatur på en ren och torr plats när den inte används.

## -Synergy Spectrum-

### Rengöring:

1. Öppna yttre svarta överdraget och dra ut dynan. (Fig. 2) Har du valt att använda inkontinensöverdraget finner du då ett blått inre överdrag, som desinfeceras för hand.
2. Yttre svarta överdraget tvättas i maskin på 60°C. Hängtorka eller torka i torkskåp på **låg** temperatur, max 30°C. Använd ej blekmedel.
3. Rengör dynstommen med mjuk fuktig trasa och utspädd tvällösning eller desinfektionsmedel. Använd inte rengöringsmedel med slipmedel eller starka kemikalier. Var noga med att torka bort alla tvålrester med rent vatten och ren trasa. Sänk aldrig ner dynan i vätska, detta skadar dynan.
4. Sätt på överdragen (det blå inkontinensöverdraget först om detta har valts) på dynan när detta torkat helt, dra igen dragkedjan. Observera att markeringen ”bak” på dynstommen alltid ska vara åt samma håll som dragkedjan på överdraget. Det rosa skummet på dynstommen skall alltid vara uppåt. Placera sedan dynan på stolen enligt instruktionerna under ”Placering”. Markeringen ”bottom/ back” på överdraget skall alltid vara nedåt.

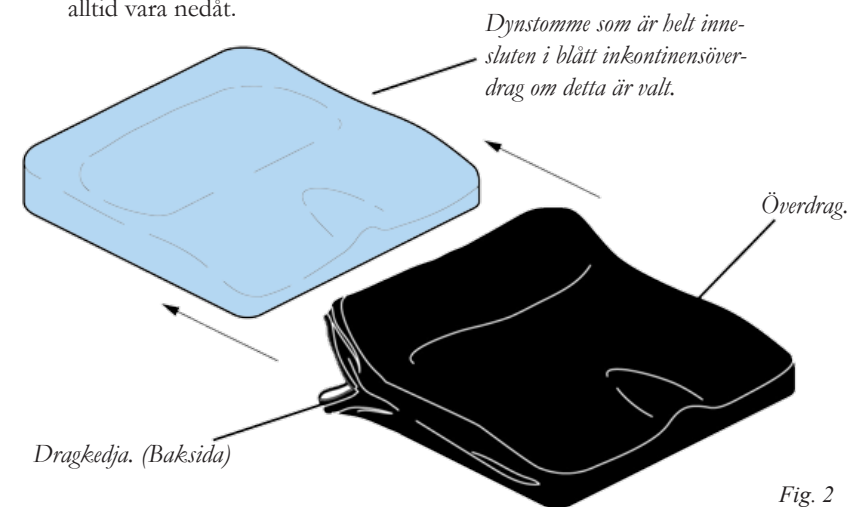


Fig. 2