

-Synergy Structure 2-

Montering och positionering:

Synergy Structure 2 kommer omonterad. Paketet innehåller extra positioneringsdelar som väljs ut för varje brukare efter behov. Positioneringsdelarna omfattar kilar och bende-lare m.m. Dessa fästs vid dynstommen med kardborreband. Positioneringsdelarna kan justeras efter behov för att maximera användarens komfort vilket bör göras av behörig personal. Försök ej att justera positioneringsdelarna medan du sitter på dynan.

1. Avlägsna överdraget.
2. Ta bort den kombinerade skum och gelöverdelen från dynstommen.
3. Avlägsna gelunderlägget från dynstommen.
5. Placera de utvalda positioneringsdelar på dynstommen med bifogade kardborreband. Placeringen bör göras av behörig personal för att optimera brukarens sittkomfort.
6. Fäst åter gelunderlägget på dynstommen.
7. Placera det kombinerade skum- och gelöverdel på dynstommen.
8. Dra på överdraget på den färdigmonterade dynan och förslut dragkedjan enligt fig. 2 (efter behov hos den enskilde brukaren.)

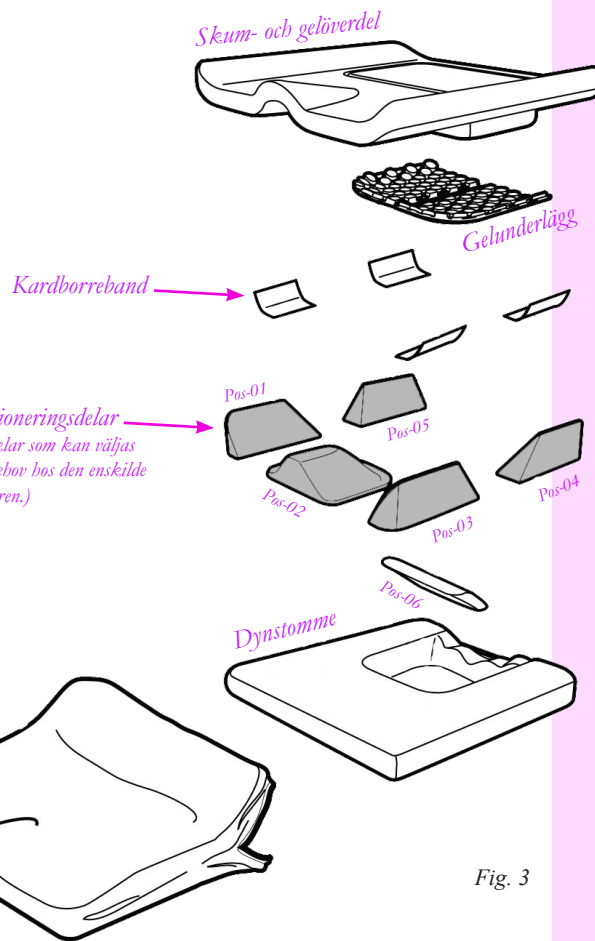


Fig. 3

Box 5021 • 448 51 Tollerød • Sverige

Telefon: 031- 710 44 70

Fax: 031-710 44 75


e-post: rehab@salubrious.se

www.salubrious.se

www.goodmedical.se

Synergy Structure 2

Denna manual skall användas för den Synergydyna som erhållits. Om det är någon information i denna manual som är oklar eller om du behöver ytterligare hjälp, vänlig kontakta Salubrious AB. Maxvikt brukare: 160 kg.

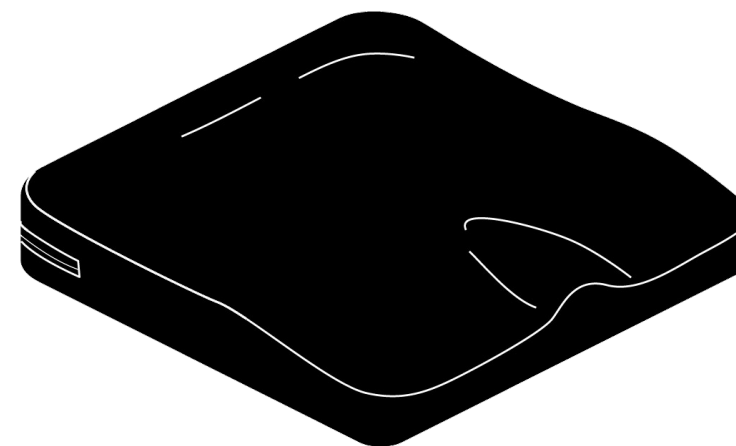

Innehållsförteckning:

Placering	2
Förvaring	2
Rengöring	3
Montering och positionering	4

-Synergy Structure 2-

Placering:

Synergy Structure 2 är uppmärkt på både dynstomme och överdrag för rätt placering.

För korrekt placering av Synergy Structure 2 gör följande:

1. Hitta etiketten med texten ”bottom/back” på dynans undersida.
2. Placera dynan på sitsen så att dragkedjan på överdraget och ”bottom/back” hamnar bak på stolens/ rullstolens sittyta. ”Bottom/back”-etiketten skall vara nedåt. Viktigt att tänka på när du sätter på överdraget.

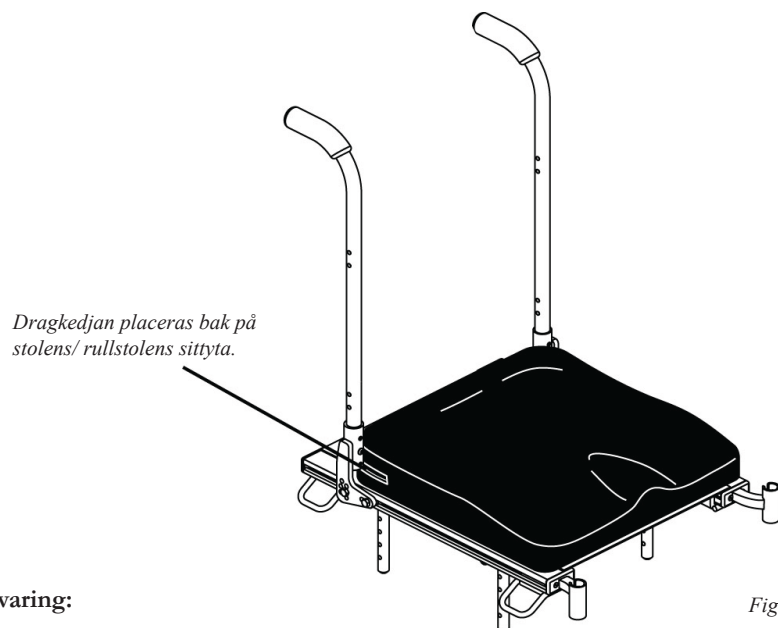


Fig. 1

Förvaring:

Synergy Structure 2 bör förvaras i rumstemperatur på en ren och torr plats när den inte används.

-Synergy Structure 2-

Rengöring:

1. Öppna överdraget och dra ut dynan. (Fig. 2)
2. Överdraget tvättas i maskin på 60°C. Hängtorka eller torka i torkskåp på **låg** temperatur, max 30°C. Använd ej blekmedel.
3. Rengör skumdynstommen, gelöverdelen, gelunderlägget och eventuellt valda positioneringsdelar med mjuk fuktig trasa och utspädd tvällösning eller desinfektionsmedel. Använd inte rengöringsmedel med slipmedel eller starka kemikalier. Var noga med att torka bort alla tvålrester med rent vatten och ren trasa. Sänk aldrig ner dynan i vätska, detta skadar dynan. **Flyttas eventuella positioneringsdelar måste dessa anpassas till brukaren igen.**
4. Låt dynan torka!
5. Sätt på överdraget på dynan när detta torkat helt, dra igen dragkedjan. Observera att markeringen ”bak” på dynstommen alltid ska vara åt samma håll som dragkedjan på överdraget. Den blå skum- och gelöverdelen på dynstommen skall alltid vara uppåt. Placera sedan dynan på stolen enligt instruktionerna under ”Placering”. Markeringen ”bottom/back” på överdraget skall alltid vara nedåt.

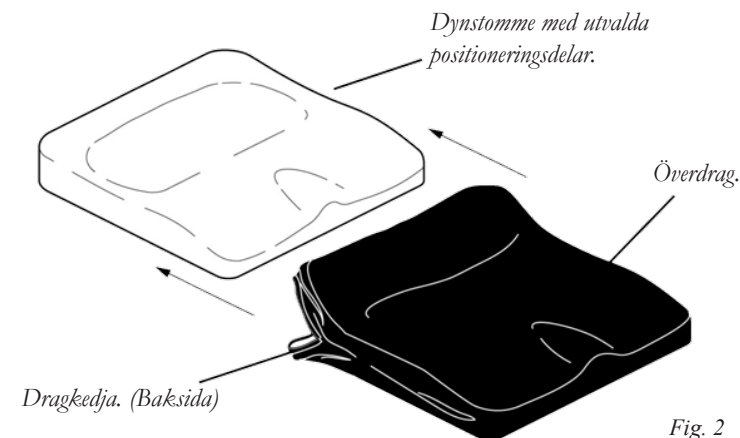


Fig. 2