


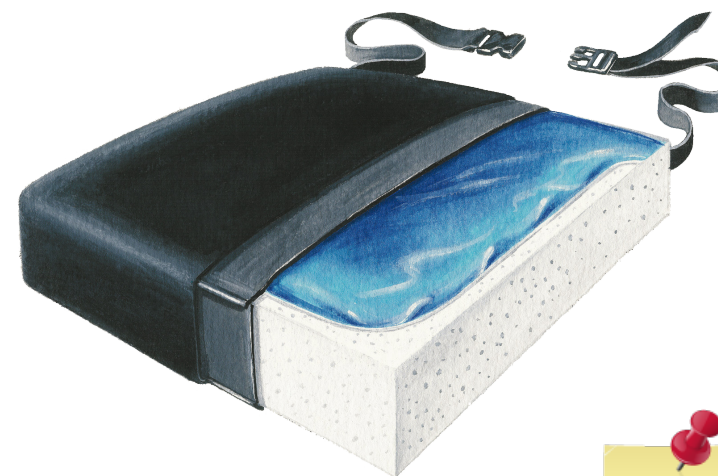

IDI-T

Denna manual skall användas för den IDI-T som erhållits. Om det är någon information i denna manual som är oklar eller om du behöver ytterligare hjälp, vänlig kontakta Salubrious AB. Maxvikt brukare: 227 kg.



Good Medical

Box 5021 • 448 51 Tollerød • Sverige

Telefon: 031- 710 44 70

Fax: 031-710 44 75

e-post: rehab@salubrious.se

www.salubrious.se

www.goodmedical.se

Innehållsförteckning:

Placering	2
Förvaring	2
Rengöring	3

-IDI-T-

Placering:

IDI-T är uppmärkt på både dynstomme och överdrag för rätt placering.

För korrekt placering av IDI-T gör följande:

1. Hitta markeringarna med instruktioner för rätt placering av dyna och överdrag.
2. Dragkedjan och bandet med snäpplås skall vara bak på sitsen. Bandet och snäpplåset används vid behov där dynan behöver stabiliseras ytterligare.

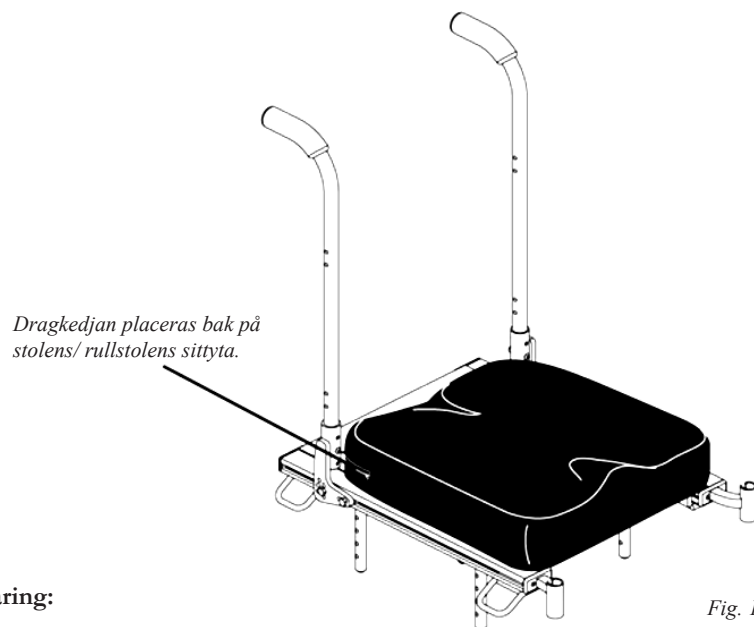


Fig. 1

Förvaring:

IDI-T bör förvaras i rumstemperatur på en ren och torr plats när den inte används.

-IDI-T-

Rengöring:

1. Öppna överdraget och dra ut dynan.
2. Överdraget tvättas i maskin på max 82°C. Hängtorka eller torka i torkskåp på **låg** temperatur, max 30°C. Använd ej blekmedel.
3. Rengör dynstommen med mjuk fuktig trasa och utspädd tvällösning eller desinfektionsmedel. Använd inte rengöringsmedel med slipmedel eller starka kemikalier. Var noga med att torka bort alla tvålrester med rent vatten och ren trasa. Sänk aldrig ner dynan i vätska, detta skadar dynan.
4. Låt dynan torka!
5. Sätt på överdraget på dynan när detta torkat helt, dra igen dragkedjan. Observera att markeringarna ”bak” och ”upp” på dynstommen hamnar åt rätt håll vid applicering av överdraget. Placera sedan dynan på stolen enligt instruktionerna under ”Placering”.

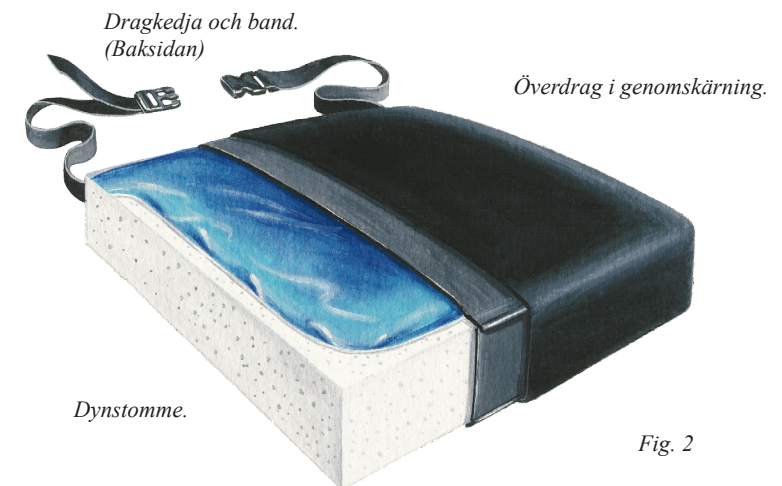


Fig. 2