


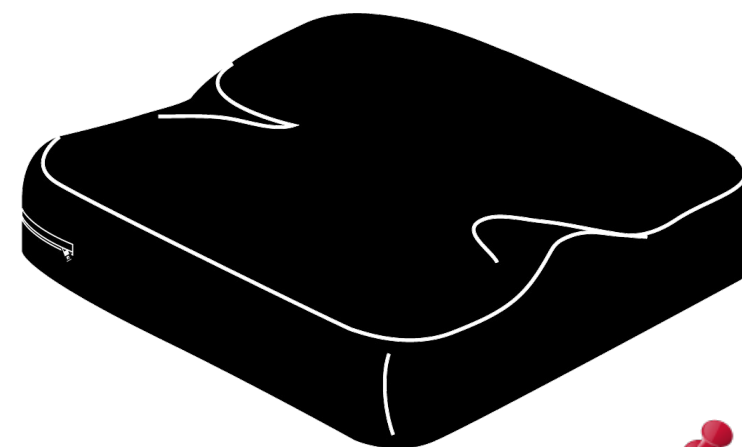

Synergy Solution 1

Denna manual skall användas för den Synergydyna som erhållits. Om det är någon information i denna manual som är oklar eller om du behöver ytterligare hjälp, vänlig kontakta Salubrious AB. Maxvikt brukare: 160 kg.



Innehållsförteckning:

Placering	2
Förvaring	2
Rengöring	3

-Synergy Solution 1-

Placering:

Synergy Solution 1 är uppmärkt på både dynstomme och överdrag för rätt placering.

För korrekt placering av Synergy Solution 1 gör följande:

1. Hitta etiketten med texten ”bottom/back” på överdraget.
2. Placera dynan på sitsen så att dragkedjan på överdraget och ”bottom/back” hamnar bak på stolens/ rullstolens sittyta. ”Bottom/back”-etiketten skall vara nedåt. Viktigt att tänka på när du sätter på överdraget. (Plansits eller skiva är önskvärt.)

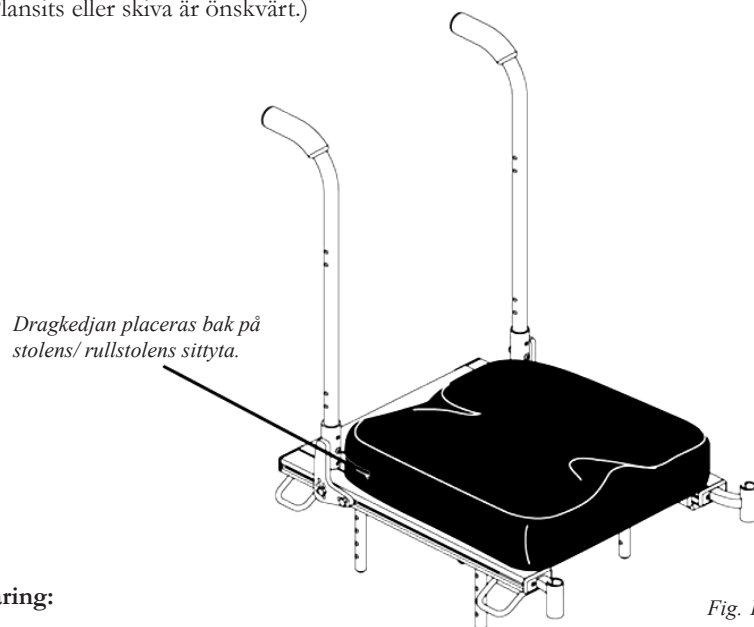


Fig. 1

Förvaring:

Synergy Solution 1 bör förvaras i rumstemperatur på en ren och torr plats när den inte används.

-Synergy Solution 1-

Rengöring:

1. Öppna överdraget och dra ut dynan. (Fig. 2)
2. Överdraget tvättas i maskin på 60°C. Hängtorka eller torka i torkskåp på **låg** temperatur, max 30°C. Använd ej blekmedel.
3. Rengör dynstommen med mjuk fuktig trasa och utspädd tvällösning eller desinfektionsmedel. Använd inte rengöringsmedel med slipmedel eller starka kemikalier. Var noga med att torka bort alla tvålrester med rent vatten och ren trasa. Sänk aldrig ner dynan i vätska, detta skadar dynan.
4. Låt dynan torka!
5. Sätt på överdraget på dynan när detta torkat helt, dra igen dragkedjan. Observera att markeringen ”bak” på dynstommen alltid ska vara åt samma håll som dragkedjan på överdraget. De gröna gelkuddarna på dynstommen skall alltid vara uppåt. Placera sedan dynan på stolen enligt instruktionerna under ”Placering”. Markeringen ”bottom/ back” på överdraget skall alltid vara nedåt.

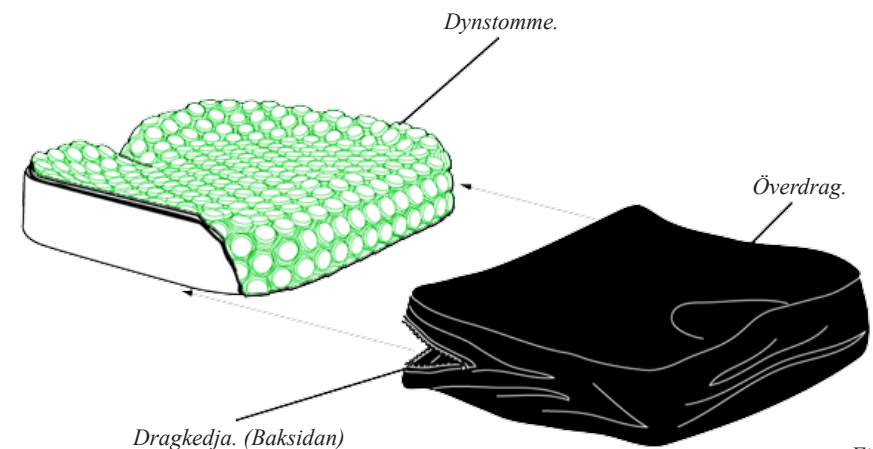


Fig. 2